




SURGICAL WORKS

GUÍA QUIRÚRGICA PARA TORNILLOS PEDICULARES

- INSTRUCCIONES DE USO -

- GUÍAS QUIRÚRGICAS A MEDIDA -

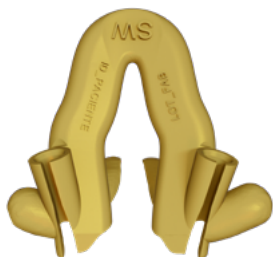

PRODUCTO SANITARIO	Clase IIa
ESTADO	No estéril
USO	Un solo uso
DESTINO	Específico para paciente

Las guías quirúrgicas fabricadas por **Surgical Works** son dispositivos médicos de **Clase IIa** destinados a facilitar la colocación de implantes en procedimientos quirúrgicos. Deben ser utilizadas exclusivamente por personal cualificado y formado en el uso de instrumental y técnicas quirúrgicas pertinentes. Antes del uso clínico, el cirujano debe conocer completamente el procedimiento y las limitaciones del instrumental.

Advertencias

Debe tener precaución de no cortarse con instrumentos afilados. El instrumental debe inspeccionarse para detectar defectos. Los dispositivos son de un solo uso y específicos para un paciente.

Limpieza y esterilización

El instrumental se suministra no estéril. Todos los componentes deben retirarse del envase y esterilizarse antes de su uso siguiendo los protocolos del hospital.

Declaración importante

Está prohibida cualquier modificación del instrumental. Todos los instrumentos diseñados para la intervención, usados o no, deben desecharse tras finalizar el procedimiento.

Eliminación

Eliminar el material conforme al protocolo del centro sanitario.